


Bruksanvisning **AccuSign** singeltest


Öppna förpackningen och ta fram testplattan (se till att testen har rumstemperatur och att den inte har passerat utgångsdatum innan förpackningen bryts).

Sug upp urin med pipetten och släpp 3 droppar på testplattan i fältet "S".

Placera testplattan på ett plant underlag.

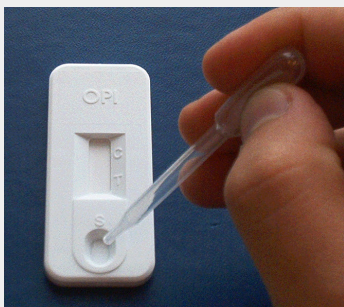

Avläsning av resultat

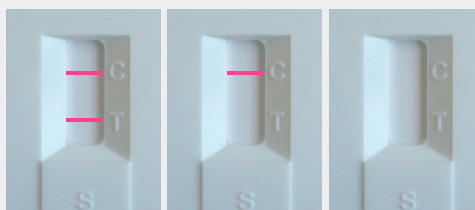

Negativ

Positiv

Ogiltig

Avläsning av testen:

Börja avläsa testen efter 3 minuter. Om båda streck (C & T) har kommit fram efter 3 minuter, kan avläsningen avslutas. Om teststrecket (T) inte har kommit fram, vänta 10 minuter med att avläsa. Om där inte har kommit fram teststreck (T) efter 10 minuter är testen positiv. Avläs inte resultatet efter 10 minuter.

Innan man avläser en test, ska man säkra sig att kontrollstrecket (C) kommit fram, är kontrollstrecket inte synligt får testen inte användas. Kontrollstrecket visar, att testen är korrekt utförd och att rätt mängd urin har tillförts.

Negativ: både kontrollstreck (C) och teststreck (T) ska vara synligt i avläsningsfältet (se bilden).

Positiv: endast kontrollstrecket (C) är synligt i avläsningsfältet (se bilden).

Teststrecken kan vara mer eller mindre tydliga i jämförelse med varandra. En del streck kommer fram snabbare än andra. Minsta antydning till teststreck ska tolkas som ett negativt resultat.

Bruksanvisning **AccuSign** multitest

1. Tag ut testplattan ur förpackningen när den ska användas. Testen ska ha rumstemperatur innan förpackningen öppnas.

2. Sug upp urin med pipetten och släpp 3 droppar på testplattans två nedre fält.

3. Börja avläsa testen efter 3 minuter. Om alla streck har kommit fram efter 3 minuter, kan avläsningen avslutas. Har ett eller flere streck inte kommit fram, vänta 10 minuter med att avläsa. Om där inte har kommit fram streck efter 10 minuter är testen positiv. Avläs inte resultatet efter 10 minuter.




Innan man avläser en test, ska man säkra sig att kontrollstrecket (C) kommit fram, är kontrollstrecket inte synligt får testen inte användas. Kontrollstrecket visar, att testen är korrekt utförd och att rätt mängd urin har tillförts.

Negativ: både kontrollstreck (C) och teststreck (T) ska vara synligt i avläsningsfältet (se bilden).


Positiv: endast kontrollstrecket (C) är synligt i avläsningsfältet (se bilden).

Teststrecken kan vara mer eller mindre tydliga i jämförelse med varandra. En del streck kommer fram snabbare än andra. Minsta antydan till teststreck ska tolkas som ett negativt resultat.


Avläsning av testen:

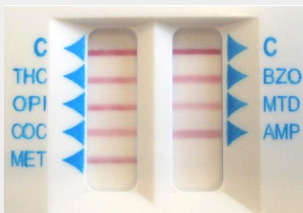

Alla parametrar är negativa.

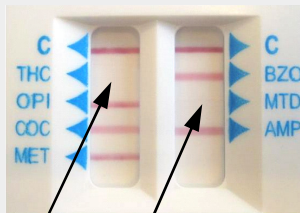

THC og MTD er positive, resten er negativ.

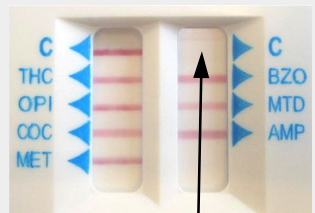

Høyre side er negativ, kontrollstrecket har ikke kommet fram! Alle parametere på venstre side er negative.