

Bruksanvisning Ferle Saliva drogtest


Provtagning

Det får inte intagas mat, dryck, tobak eller tuggummi 10 minuter före provtagning.

1. Ta ut produkterna från förpackningarna.



2. För topsen runt i munnen och på tungan i minst 3 minuter. Provet är klart när hela svampen på topsen är genomvåt.

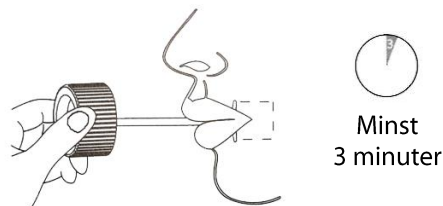

3. Sätt i topsen i testbehållaren och skruva fast den



4. Ta av den orange etiketten av testbehållaren och avläs resultaten inom 3-10 minuter. Om alla streck är tydliga efter 3 minuter, eller tidigare, kan resultaten tolkas som negativa. Om ett eller flera streck inte är synliga efter 3 minuter, skall testen först avläsas efter 10 minuter.



5. **Avläsning av resultat:**

