
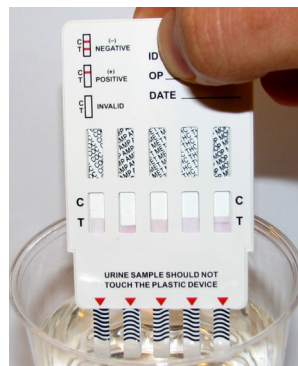



1. Ta ut testet ur förpackningen. Testet ska ha rumstemperatur. Var uppmärksam på att inte överskrida datumet för sista användningsdag. Ifyll evt. fältet med IDnummer och datum. Ta bort det avtagbara plastmembranet.
2. Doppa ner teststrimlorna i urinen. Halva teststrimlan ska doppas i urinen. Håll nere teststrimlorna till urinen börjar att dras upp i fälten ovanför. Ta upp testet när urinen har nått till T-linjen i alla fält. Placera testplattan på ett plant underlag.
3. Avläs kreatinin, Oxidant och pH mot färgschemat.

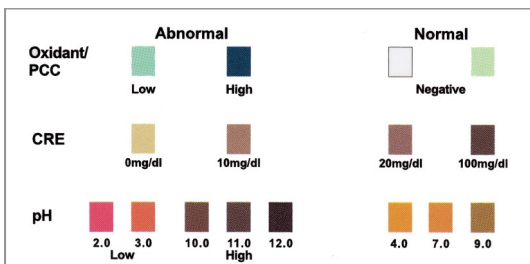

4. Avläsning av drogtestet:

Börja avläsa testet efter 3 minuter. Om alla streck har kommit fram efter 3 minuter, kan avläsningen avslutas. Om ett eller fler streck inte har kommit fram, vänta 10 minuter med att avläsa. Om där inte har kommit fram ett eller flera teststreck (T) efter 10 minuter är testen positiv. Avläs inte resultatet efter 10 minuter.

Innan man avläser ett test, ska man säkra sig att kontrollstreck (C) kommit fram, är kontrollstreck inte synligt får testet inte användas. Kontrollstreck visar, att testet är korrekt utförd och att rätt mängd urin har tillförts.

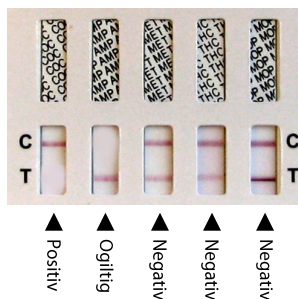

Negativ: både kontrollstreck (C) och teststreck (T) ska vara synligt i avläsningsfältet (se bilden).

Positiv: endast kontrollstreck (C) är synligt i avläsningsfältet (se bilden).

Teststrecken kan vara mer eller mindre tydliga i jämförelse med varandra. En del streck kommer fram snabbare än andra. Minsta antydan till teststreck ska tolkas som ett negativt resultat.